




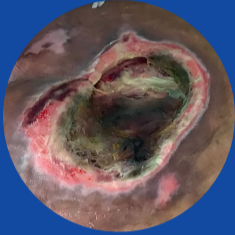
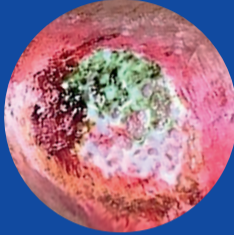
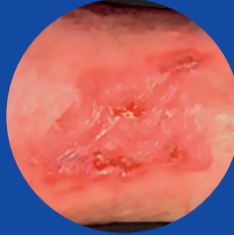

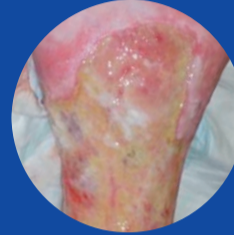


Flaminal®: Für alle Phasen der Wundheilung. Vielseitig & sicher.

Das Alginol Flaminal® mit antimikrobiellem Enzymsystem und absorbierenden Eigenschaften unterstützt die vielseitigen und individuellen Bedürfnisse in jeder Phase der Wundheilung.

					
	Gewebemanagement	Infektionskontrolle	Exsudatmanagement	Wundränder	Umgebungshaut
Beurteilung	 Vitales Gewebe?	 Gibt es Zeichen einer Entzündung wie Schmerz, Überwärmung, Rötung, Schwellung?	 Ist wenig oder viel Exsudat vorhanden?	 Wundränder intakt, geschädigt, mazeriert?	 Ist die Umgebungshaut trocken und schuppig oder gibt es Anzeichen von Hautabschürfungen?
Maßnahme	Debridement, um abgestorbenes Gewebe zu entfernen.	Keimbelastung minimieren, z. B. mit Wundauflagen, die einen antimikrobiellen Effekt besitzen.	Wundverband wählen, der ein idealfeuchtes Wundmilieu unterstützt.	Reepithelisierung fördern und intakte Wundumgebung schützen.	Haut reinigen, bei trockener Haut für ausreichende Feuchtigkeitsbalance sorgen und die Haut vor weiteren Schäden schützen.
Ergebnis	Sauberes, vitales Wundbett.	Bakterielles Gleichgewicht und Reduzierung der Entzündung.	Feuchtes Wundmilieu stellt sicher, dass die Wunde gut heilen kann. Die Lebensqualität des Patienten ist verbessert.	Migration von Epithelzellen, bedingt durch intakten Wundrand, fördert den Wundverschluss.	Eine intakte Haut verringert das Risiko von Hautverletzungen und Infektionen.
	✓ Flaminal® bietet ein autolytisches Debridement und reinigt die Wunde kontinuierlich.	✓ Flaminal® mit einzigartigem, antimikrobiellem Enzymsystem bietet Schutz vor Infektionen und der Bildung von Biofilm.	✓ Flaminal® sorgt für ein optimales, feuchtes Wundmilieu, d. h. es hält die Wunden feucht und absorbiert überschüssiges Wundexsudat.	✓ Flaminal® schützt die Wundränder vor Mazeration.	✓ Flaminal® ist sicher für umliegende Haut und das Wundgewebe.

JETZT
auch als
10 x 10 g Pack

Scannen
und mehr
über die
Anwendung
erfahren:



Flaminal® hydro
Geringerer Alginatgehalt
Für leicht bis mäßig exsudierende Wunden

Packungsgröße	PZN
10 x 10 g	17544419
25 g	09886318
40 g	09886324



Flaminal® forte
Höherer Alginatgehalt
Für stark exsudierende Wunden

Packungsgröße	PZN
10 x 10 g	17544402
25 g	09886330
40 g	09886347



Flaminal® forte & Flaminal® hydro

Wundversorgung in einer neuen Dimension.

Flaminal®
Absorbierendes Alginol