

# ANLEGEHINWEISE

## SEITE 1/2



### SELBSTÄNDIG ANLEGEN

Dank elastischem Material und wiederverschließbaren Laschen passt sich die neue TENA ProSkin Stretch dem Körper an, sodass Benutzer das Produkt leichter anlegen, individuell anpassen und für Komfort und Sicherheit einstellen können (im Vergleich zu TENA ProSkin Slip & Pants).

### MIT DEHNBAREN SEITEN

Elastische Seitenteile, die sich dem Körper anpassen und sowohl sicher als auch bequem sitzen.



### MIT BREITEN, VERSTELLBAREN KLETTVERSCHLÜSSEN

Die Klettverschlüsse sind einfach zu handhaben und bleiben sicher verschlossen. Befestigen Sie das Produkt über den Hüften und ziehen Sie es nach oben, um es zu fixieren, ohne sich vollständig ausziehen zu müssen.



### EINFACH HOCH- UND RUNTERZIEHEN

Kann wie Unterwäsche hoch- und runtergezogen werden, was das Anlegen und die Verwendung auf der Toilette erleichtert.



## HIER GEHT'S ZU DEN ANLEGEVIDEOS

Sie können sich das Anlegen auch in einem Video anschauen.



Anlegen  
im Sitzen,  
eigen-  
ständig



Anlegen  
im Stehen



Anlegen  
im Liegen

## ANLEGEHINWEISE

## SEITE 2/2



## HIER ERFAHREN SIE, WIE DIE TENA PROSKIN STRETCH ANGELEGT WIRD

**1) Produkt vorbereiten**

Falten Sie die TENA Stretch vollständig auf.

**2) Saugmatte formen**

Falten Sie die Saugmatte der Länge nach, sodass eine schalenartige Form entsteht.

**3) Hüftbund öffnen**

Öffnen Sie den Hüftbund an den Verschlüssen.

**4) Positionierung des Produkts**

Halten Sie den rechten Verschluss des Hüftbundes in der rechten Hand. Ziehen Sie mit der linken Hand die Vorderseite des Produkts zwischen die Beine nach vorne.

**5) Rechten Verschluss schließen**

Befestigen Sie den rechten Verschluss vorne um das rechte Bein.

**6) Linken Verschluss schließen**

Führen Sie den linken Verschluss unter den Beinen hindurch zur linken Seite. Fixieren Sie ihn vorne um das linke Bein.

**7) Produkt hochziehen**

Stehen Sie auf und ziehen Sie die TENA Stretch über die Hüften nach oben.

**8) Passform anpassen**

Der Hüftbund kann beliebig oft geöffnet, angepasst und wieder geschlossen werden, bis das Produkt sicher und bequem sitzt.

**Alltagstauglichkeit**

Die TENA Stretch lässt sich wie normale Unterwäsche hoch- und runterziehen.

## HIER GEHT'S ZU DEN ANLEGEVIDEOS

Sie können sich das Anlegen auch in einem Video anschauen.



Anlegen  
im Sitzen,  
eigen-  
ständig



Anlegen  
im Stehen



Anlegen  
im Liegen